

Brug prøvetagningsblankettens etiketter rigtigt

Vidste du, at der nederst på prøvetagningsblanketten er ekstra etiketter? Stregkoderne på ekstra-etiketterne er identiske med stregkoderne på etiketterne i blankettens højre side.

Blankettens ekstra etiketter kan derfor være en hjælp til dig, hvis ...

- Stregkoden på en af etiketterne er defekt/ulæselig (scenarie X)
- En blodprøve med etiket må tages om, og du derfor behøver en ekstra etiket med samme stregkode (scenarie Y)

PTB MedCom 4
Rekv. nr.: 102061656207

Rekv. nr.: 102061656207

102061656215 HÆM
077542 Lilla4

102061656223 HAPT
077542 Grøn4

102061656231 Kemi
077542 Grøn4

102061656240 KFINR
077542 Blå2,7

102061656258 GLC
077542 Lyserød

Ekstra-etiketter

102061656215 102061656223 102061656231 102061656240 102061656258

102061656215 102061656223 102061656231 102061656240 102061656258

Genbestilling: MedCom 4 - Ganket A/S tlf.: 32 53 93 00 - ganket@ganket.dk

Scenarie X
Er etiketten defekt,
benyttes ekstra-etiketten

Scenarie Y
Er etiketten blevet påsat
et prøverør, hvor prøven
må tages om, benyt da
ekstra-etiketten til den
nye prøve

Kvalitet i prøvetagningen starter med læselige etiketter