



## Vejledning i prøvetagning og mærkning af væskebase- ret cervixcytologi (tyndtlagsteknik)

### Med Cervex Combi børste i forbindelse med screening for livmoderhalskræft

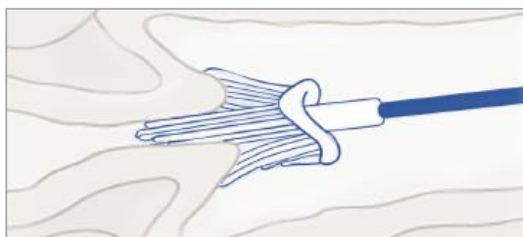

Før Cervex-CombiBrush® ind i endocervikalkanalen indtil børsten formes mod cervix. Drej børsten med et let vedholdende tryk 2 omgange med uret.

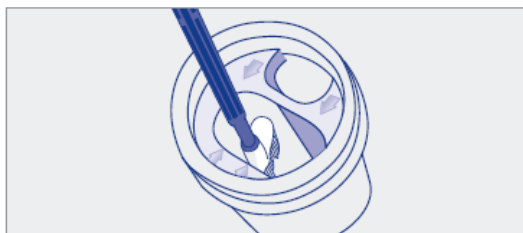

Idet børsten straks anbringes i beholderen med fikseringsvæske, adskilles børstehovedet fra skaftet ved at indføre børstehovedet i beholderens største åbning, dreje børsten 90 grader og trække børsteskaftet tilbage.

Skru låget fast på beholderen.



Mærk beholderen med patientens navn og cpr.nr. (Label fra elektronisk rekvirering.)  
Label **SKAL DÆKKE** de fortrykte 2D strekkoder, placeres vandret, så den ikke dækker låg og hak i bund på beholderen.

Beholderen sendes på vanlig vis til:

PATOLOGIAFDELINGEN  
Aalborg Universitetshospital